

Návod

Souprava pro odběr srovnávacího vzorku pro DNA analýzu

DNA Collector

UPOZORNĚNÍ:

Ujistěte se, že osoba poskytující srovnávací vzorek z ústní dutiny nejedla, ani nepila nejméně 20 minut před odběrem.

BĚHEM ODBĚRU NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ DOJÍT KE KONTAKTU TAMPONU S JINÝM POVRCHEM, NEŽ JE ÚSTNÍ DUTINA OSOBY. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SOUPRAVU ZNEHODNOTĚTE A POUŽIJTE NOVOU.

POSTUP ODBĚRU:

1. Rozloženou krabičku pro uložení tampónů položte nepotříštěnou stranou nahoru.
2. Nasadte si ochranné rukavice.
3. Na spodní straně vyhněte do kolmé pozice adaptéry pro uchycení tamponu.
4. Odběr vzorku proveďte následujícím způsobem:
 - a. Zkontrolujte neporušenost obalu tamponu.
 - b. Za dřík vyjměte tampon, a po volném zasunutí do otevřených úst osoby proveďte během 15-20 vteřin krouživým pohybem stěr povrchu ústní sliznice.
 - c. Tampon se srovnávacím vzorkem vložte bezprostředně po odběru do adaptéru pro uchycení tamponu. Dřík tamponu zatlačte do kulatých výřezů. Obal tamponu znehodnoťte.
 - d. Celý postup opakujte i s druhým tamponem.
5. Po vložení druhého tamponu do adaptéru postupně směrem od sebe skládejte krabičku.
6. Po složení krabičky proveďte její zabezpečení proti neoprávněné manipulaci pomocí přiložených přelepek. Přelepky umístěte na označená místa.
7. Zabezpečenou krabičku jednoznačně označte jménem či kódem. Toto označení následně vyplňte do formuláře Požadavek na analýzu DNA.

OD JEDNÉ OSOBY SE ODEBÍRAJÍ VZORKY NA 2 TAMPONY A OBA TAMPONY SE VKLÁDAJÍ DO 1 KRABIČKY OZNAČENÉ JMÉNEM ČI KÓDEM.

Vzorky vložené do papírové krabičky se stabilizují během transportu vyschnutím. **V žádném případě nekládejte vzorky do neprodyšných obalů ani se nepokoušejte vzorky chladit či mrazit.**